


Digitaalinen alkoholimittari 372-PFT-662

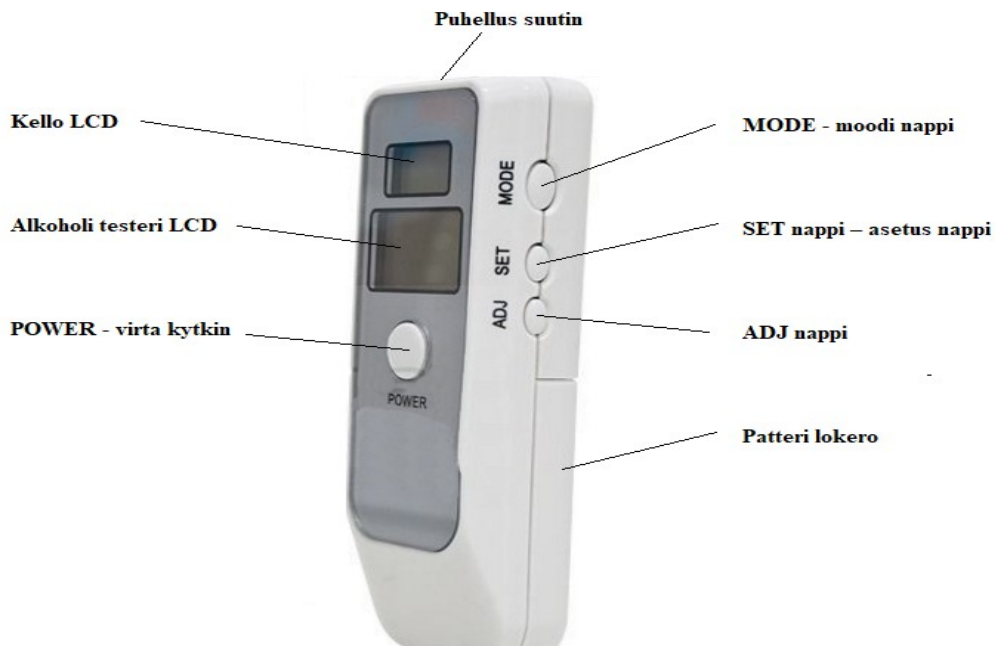

Ominaisuudet:

1. Kaksois LCD näyttö
2. Digitaalinen alkoholitestin ääni merkillä
3. Mittaväli: 0.00 – 0.19% BAC & 0.0-1.9g/l
4. Nopea mittaustulos
5. Automaattinen virran pois kytkentä
6. Oikea aika ja hälytys ajastin
7. Lämpötila
8. Alaspäin laskeva laskuri
9. Alkoholi testeri käyttää 2 x AAA paristia
10. Kello käyttää 1 x AG13 nappiparistoa

Patterien asennus

1. Liuta takapuolella oleva kansi auki
2. Aseta kaksi AAA paristoa paikoilleen oikein päin.
3. Poista nappipariston (AG13) muovi suoja
4. Sulje kansi

Kuinka käytät alkoholitesteriä

Lämmitys

1. Paina POWER nappia kerran. Alkoholi testerin LCD näyttöön tulee warm up ja laskuri menee 10:stä 0:aa.

Huom! Jos lämmitys epäonnistuu, niin laite yrittää uudestaan lämmitystä 1- 3 kertaa.

Testaus

1. Kun lämmitys on onnistunut ilmestyy näyttöön BLOW teksti ja laskuri laskee 10:stä 0:aan.
2. Puhalla tämän aikana 3-5 sekuntia laitteen yläosaassa olevaan puhallus suuttimeen (kolme pitkittäistä reikää ylhäällä).
3. Lue testitulokset näytöstä.
4. Caution (varovaisuus) teksti tulee kun alkoholi taso on seuraavilla tasoilla:
0.02% - 0.05% (0.2 promillea – 0.5 promillea)
0.05% - 0.08% (0.5 promillea – 0.8 promillea)
5. Danger (vaara) teksti piippauksen kanssa seuraavilla tasoilla:
Yli 0.05% (yli 0.5 promillea)
Yli 0.08% (yli 0.8 promillea)

Automaattinen pois kytkentä

6. Kun tulos on näytetty 10 sekuntia OFF teksti tulee näyttöön ja 2-3 sekunnin kuluttua testeri sammuu automaattisesti.
7. Jos lämmitys epäonnistuu testeri sammuu automaattisesti.
8. Jos puhallusta ei tapahdu 10 sekunnin sisällä testaus moodissa testeri sammuu automaattisesti.

Tarkemmat tiedot lisäominaisuuksista, kuten kellon, hälyttimen sekä lämpötila moodin käytöstä, pakkauksen muknana tulevassa ohjeessa (englannin kielinen).