




Attends Cover-Dri sarja on suunniteltu erityisesti vuoteiden ja istuinten suojaamiseen, täydentämään suojausta silloin kun on olemassa vuotoriski.

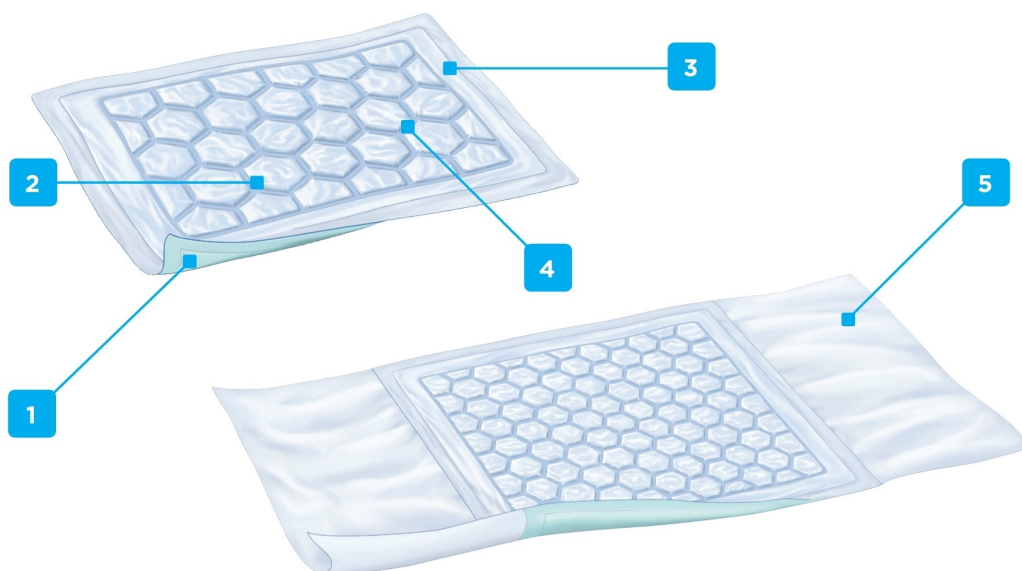

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1 Väritykseltään hillitty taustamateriaali on vedenpitävä ja luistamatonta, mikä pitää tuotteen hyvin paikoillaan.</p> | <p>2 Yksittäiset imutyynyt imevät nopeasti kosteuden ja niiden välissä olevat lyhyet kanavat levittävät nesteen tehokkaasti estäen lammikoiden syntymistä.</p> | <p>3 Tuotteen reunoja kiertävä vuotosuoja vähentää ohivuotojen riskiä.</p> |
| <p>4 Imukykyä lisäävä superabsorbenttiydin vähentää ohivuotoja, toimii hajunestona ja lisää ihon kuivuutta. Erityistuote Attends Cover-Dri Special Care on suunniteltu imemään suuria määriä nestettä nopeasti ilman superabsorbenttia.</p> | <p>5 Attends Cover-Dri Plus 80x170 suojan petaussiivekkeet pitävät tuotteen napakasti paikoillaan sängyssä.</p> | |

Tuotteet kätevästi verkkokaupastamme
FYSNET.FI

www.fysnet.fi


info@fysnet.fi

045 137 4622



Käyttöohje

Valmistelut

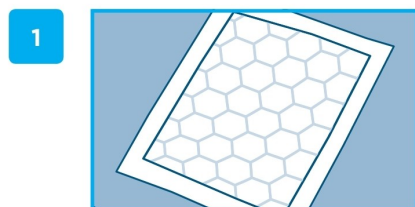


1 Avaa tuote kokonaan ja varmista, että vedenpitävä austamateriaali tulee vuoteeseen päin ja imutyyny pinta ihoa vasten.

Tuotteen käyttäminen



2 Aseta henkilö vuoteensuojalle.

Tuotteen vaihtaminen

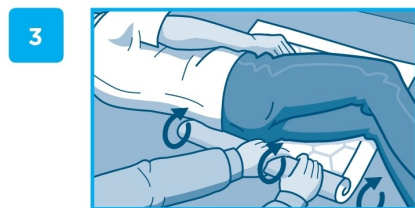

3 Käännä henkilö kyljelleen ja rullaa käytetty vuoteensuoja käyttäjän selän taakse.



4 Avaa uusi vuoteensuoja ja aseta se käyttäjän selän taakse.



5 Käännä henkilö takaisin vuoteensuojalle ja varmista, että suoja on suorana sängyllä. Ota käytetty suoja pois.



6 Aseta henkilö takaisin alkuperäiseen asentoon.

Neuvoja ja vinkkejä

Tuotevalikoima

- Valitse oikea tuotekoko ja imukyky käyttötilanteen mukaan.

Ohivuoto

- Varmista, että vuoteensuojan tuotekoko ja imukyky on käyttötilanteeseen sopiva.

Tuotteen hävittäminen

- Rullaa suojat ja käsittele toimipisteesi jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä laita suojaa WC-pönttöön.



Attends Cover-Dri -vuoteensuojat on proDERM testattu ja hyväksytty dermatologisen tutkimusinstituutin toimesta (poislukien Cover-Dri Special Care).

Tuotteet kätevästi verkkokaupastamme
FYSNET.FI

www.fysnet.fi

info@fysnet.fi

045 137 4622