


Suihku- kylpytuoli, selkänojalla ja käsinojilla

Tuotekoodi: 607-U265-Q

Osat

- A. Istuin
 - B. Ristiin tulevat jalkaparit
 - C. Tuolin alle tulevat Selkänojan kiinnikkeet
 - D. Selkänoja
 - E. Käsinojat
 - F. Käsinojien kiinnityspotket
- Ruuvit

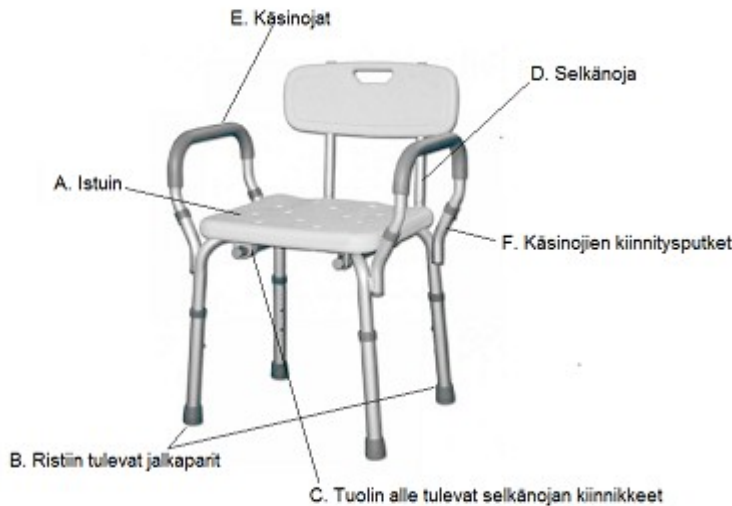

Tuolin kokoaminen

1. Istuin (A) käännetään ylösalaisin.
2. Jalkaparit 2kpl (B) asetetaan istuimeen (A) ristikkäin.
3. Jalkaparien kiinnityskohtiin tulee selkänojan kiinnikkeet (C)
4. Kiinnikkeet ja jalkaparit ruuvataan kiinni istuimeen.
5. Selkänoja työnnetään istuimen alle kiinnitettyjen kiinnikkeiden läpi
6. Käsinojat työnnetään tuolin sivuilla oleviin käsinokien kiinnityspotkiin (F).