

Verenpainemittari 213-KD735

Tuotekoodi: 213-735-Q



Automaattinen ranneverenpainemittari ammattikäyttöön sekä kotikäyttöön suurella ja helposti luettavalla LCD-näytöllä

Helppokäyttöinen.

Sen toiminta on hyvin yksinkertaista, paina vain painiketta aloittaaksesi mittauksen.

Käyttö



1. Kellon asetus

1. Aseta patterit laitteeseen (4 x AAA)
2. Paina "START/STOP" ja "M" nappia 1 s ajan.
3. Näytössä vilkkuu kellonaika.
4. Paina "START/STOP" ja voit asettaa kuukauden M napilla.
5. Paina "START/STOP" ja voit asettaa päivän M napilla.
6. Paina "START/STOP" ja voit asettaa tunnit M napilla.
7. Paina "START/STOP" ja voit asettaa miinuutit M napilla.
8. Paina "START/STOP" laite menee pois päältä ja asetuksen on päivitetty.

3. Mansetin asettaminen ranteeseen

Laita mansetti ranteeseen, siten että kuvaruutu on rystyapuolella. Kiristä mansetti ja kiinnitä tarranauhaan. Pidä käsivarsi pöydällä siten, että mansetti on sydämen tasolla ja että kämmen on alaspäin.

4. Mitauksen suorittaminen

Ole rauhassa paikoillasi useamman minuutin ajan, jotta verenpaine tasaantuu. Paina "START/STOP" nappia. Hetken kuluttua mittaus alkaa ja jonka jälkeen mittarissa näkyy mittaus tulokset.

Manuaalisesti laitteen voi sammuttaa "START/STOP" painikkeella.

Huomioita

1. Ole rauhallisesti 5 minuuttia ennen verenpaineen mittausta
2. Mansetti tulee olla sydämen kanssa samalla korkeudella
3. Mittauksen aikana ei tule puhua tai liikutella vartaloa tai käsivartta
4. Mittaa samasta käsivarresta kulloisellakin mittauskerralla

Rentouta itsesi eri mittaus kertojen välillä 1 – 1.5 minuuttia ja anna verenkierron palautua normaaliksi käsivarressasi.

5. Tekniset tiedot

Tekniset tiedot:

- Malli: KD-735.
- Laitteen koko: Noin. 85mm x 28mm x 64,5 mm.
- Paino: Noin. 110 g (Ilman paristoja).
- Mansetin ympärysmitta 14-19,5 cm
- Mittausmenetelmä: Oskillometrinen, automaattinen inflaatio ja mittaus.
- Muisti: 60 mittausta, pvm ja aika.
- Mittausalue:

Mansettipaineen: 0-300 mmHg.

Systolinen: 60-260 mmHg

Diastolinen: 40-199 mmHg

Sykkeen: 40-180 lyöntiä / minuutti

- Akun kesto: Noin 270 mittausta.
- Ohjekirja englanninkielinen
- Virtalähde: paristot 2 x 1,5 V AAA. (ei mukana tuotteessa)

Takuuaika on 1 vuosi.