





0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Attends - numerointijärjestelmä kertoo imukyvyn

Attends for Men on anatomisesti muotoiltu sarja miehille, joilla on virtsankarkailua.

Imukyvyt 1 ja 2 on suunniteltu miehille, joilla on jälkitiputtelua.

Imukyvyt 3 ja 4 on suunniteltu miehille, joilla on lievää tai keskivaikeaa virtsankarkailua.

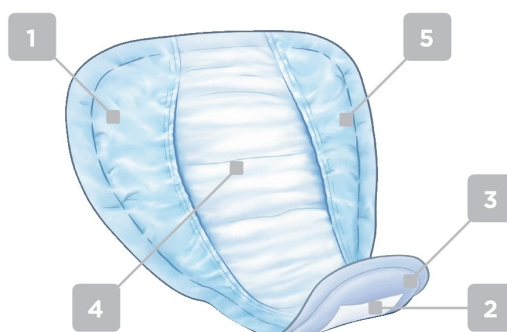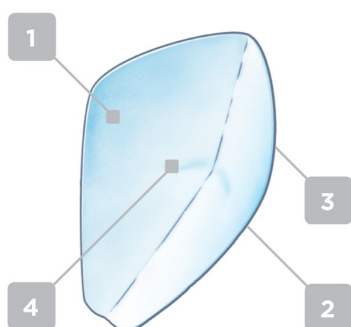

- 1 Anatomisen muotoilun ansiosta tuotteet istuvat hyvin, mikä lisää käyttömukavuutta, huomaamattomuutta ja suojaa ohivuotoja vastaan.
- 2 Alushousuihin kiinnitettävän kiinnitysteipin avulla tuotteet pysyvät hyvin paikoillaan ja ohivuotojen riski vähenee.
- 3 Pehmeä, hengittävä, kahisematon tekstiilitausta lisää käyttömukavuutta.
- 4 Erityisen imuytimen ansiosta tuote on ohut ja huomaamaton, mutta silti hyvin imukykyinen tarjoten suojaa ohivuotoja vastaan, kuivuutta iholle ja hajunestoa.

- 1 Anatominen muotoilu takaa hyvän istuvuuden miehen anatomialle, tuotteet ovat huomaamattomia ja ne tarjoavat suojaa ohivuotoja vastaan.
- 2 Liimaraikitiinnityksen ansiosta suojia voidaan käyttää napakasti istuvien alusvaatteiden kanssa huomaamattomasti.
- 3 Pehmeä, hengittävä, kahisematon tekstiilitausta lisää käyttömukavuutta.
- 4 Imukykyä lisäävä superabsorbenttiydin vähentää ohivuotoja, toimii hajunestona ja lisää ihon kuivuutta.
- 5 Vuotosuojat antavat op. ja vähentävät ohivuotojen riskiä.

Tuotteet kätevästi verkkokaupastamme

FYSNET.FI

www.fysnet.fi

info@fysnet.fi

045 137 4622

Attends® For Men




Pukemisohje




1

Varmista, että tuote on taitettu auki niin, että leveämpi puoli on ylhäällä (kuten suojapaperin nuolet näyttävät). Poista suojapaperi.

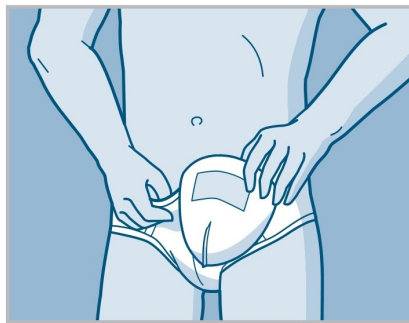

2

Kiinnitä suoja alusvaatteisiisi ja tarkista, että kuppimainen muoto säilyy, kun se kiinnitetään.

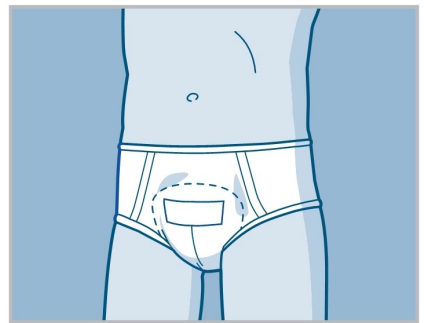

3

Kiinnitä suoja liimaraidan avulla napakasti istuviin alusvaatteisiin. Varmista ettei liimaraita joudu kosketuksiin ihon kanssa.

Neuvoja ja vinkkejä

Tuotevalikoima

- Valitse suojan imukyky käyttäjän tarpeiden mukaan.
- Käytä tippasuojan kanssa ihonmyötäisiä alusvaatteita parhaan tuloksen varmistamiseksi.
- Emme suosittele suojien käyttöä bokserien kanssa.

Hävittäminen

- Rullaa suoja ja hävitä se toimipisteesi joheiden mukaisesti.
- Älä vedä suojaa vessasta.

Tuotteet kätevästi verkkokaupastamme

FYSNET.FI

www.fysnet.fi

info@fysnet.fi

045 137 4622