




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Attends - numerointijärjestelmä kertoo imukyvyn

Attends Slip Regular -teippivaipat on suunniteltu keskivaikeasta vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin ja/tai ulosteinkontinenssiin.

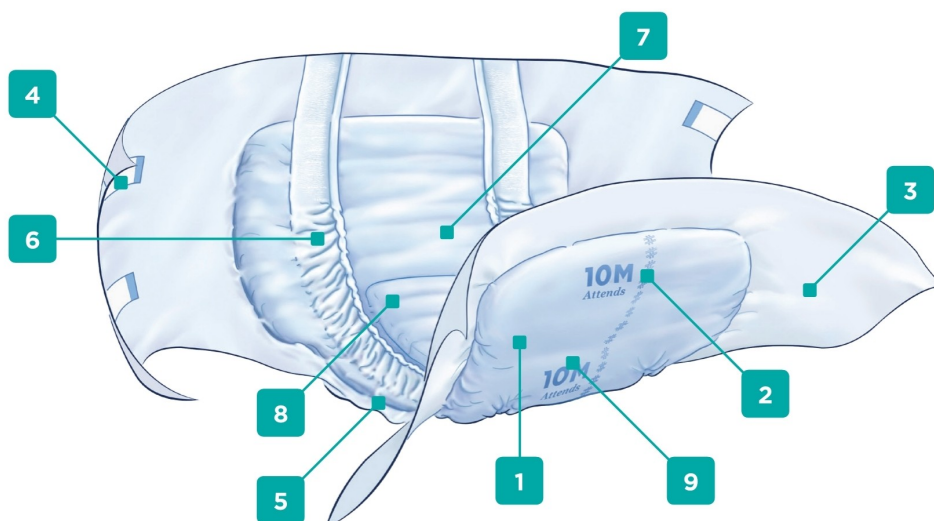

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 Valkoinen vedenpitävä taustamateriaali estää läpivuodon.</p> | <p>2 Kosteusindikaattori tukee hyvää hoitoa osoittaen vaipan vaihtotarpeen.</p> | <p>3 Lantiolla hengittävä ja miellyttävä tekstiilimäinen materiaali edistää ihon hyvinvointia (Medium ja Large).</p> |
| <p>4 Toistuvan avaamisen ja kiinnityksen mahdollistava kiinnitysjärjestelmä.</p> | <p>5 Lahkeensuun joustoreunat antavat hyvän istuvuuden ja vähentävät ohivuotojen riskiä.</p> | <p>6 Erilliset vuotosuojat estävät ohivuotoja.</p> |
| <p>7 Imuosan anatominen muotoilu parantaa käyttömukavuutta ja imuvarmuutta.</p> | <p>8 Imukykyä lisäävä super-absorbenttiydin antaa kuivuutta iholle ja poistaa epämiellyttäviä hajuja ja suojaa ohivuodoilta.</p> | <p>9 Vaipan imukykykoko on painettu taustamateriaaliin tuotteiden tunnistamisen</p> |

Tuotteet kätevästi verkkokaupastamme

FYSNET.FI

www.fysnet.fi

info@fysnet.fi

045 137 4622




Pukemisohje

Valmistelut



Tarvittaessa voi mitata lantion- ja vyötärön ympäryksen oikean koon varmistamiseksi.

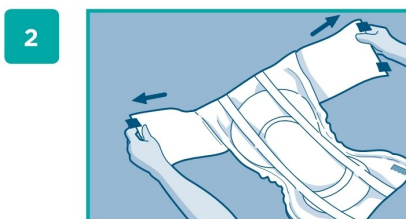

Avaa tuote ja aseta teippivyöt selkäpuolelle. Varmista, että voidaan taitokset on avattu kokokaan ennen vaipan pukemista. Varmista, että pehmeä, valkoinen sisäpinta tulee ihoa vasten.



Taita vaippa pituussuunnassa kuppimaiseksi varmistaaksesi, että vuotosuojat kääntyvät ulospäin.


Pukeminen



Taita teippivaippa kuppimaiseksi ja aseta se hyvin haaroihin niin, että se istuu hyvin nivusista. Käytä kosteusindikaattoria apuna ipan keskittämiseksi.



Vedä siivekkeet eteen ja kiinnitä teipit.

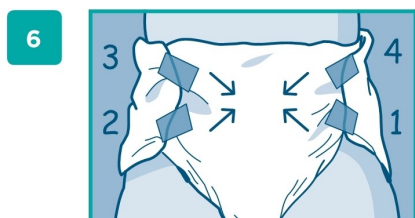

Kiinnitä ensin alemmat siniset teipit hieman yläviistoon niin, että vaippa istuu hyvin haaroista ja sitten kiinnitä ylemmät siniset teipit viistosti alaspäin, jotta saat napakan ja hyvän istuvuuden. Kiinnitystä avattaessa valkoinen teippiosa irroitetaan sinisestä alustasta.

Tuotteet kätevästi verkkokaupastamme

FYSNET.FI

www.fysnet.fi

info@fysnet.fi

045 137 4622

Neuvoja ja vinkkejä

Tuotevalikoima

- Valkoiset tuotteet ovat huomaamattomat. Siirry pienemmästä imukykyisarjasta paksumpaa teippivaippaan vasta, kun se on välttämätöntä.
- Tarvittaessa voit mitata lantion- ja vyötärönympäryksen oikeaa teippivaippakokoa varmistaessasi.
- Valitse tuotteen imukykytaso (8, 9 tai 10) virtsankarkailuasteen mukaan ja siirry korkeampaan imukykynumeroon tarvittaessa.
- Slips-teippivaipat ovat hyvä vaihtoehto vuodepotilaalle niin päivällä kuin yöllä.

Vaihtaminen

- Tarkista kosteusindikaattori - jos siitä on hävinnyt yli puolet (60%), tulisi tuote vaihtaa. Muuten tuotetta voi vielä käyttää.
- Jos tuote on puhdas ja kuiva vessassa käynnin jälkeen, tuotetta voi käyttää edelleen.
- Sinisen kiinnitysalustan tulee pysyä aina kiinni vaipassa. Avaa vaippa vetämällä valkoisesta teipistä.
- Älä kiinnitä teippiä ihoon.
- Puhdista iho sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Puhdista edestä taaksepäin.
- Vältä ölypohjaisten ja jauhe-/talkkimaisten tuotteiden käyttöä vaipan kanssa, sillä ne vähentävät virtsan imeytymiskykyä.

Pukeminen

- Varmista, että lahkeensuiden joustavat resorit jäävät teippivaipan ulkopuolelle - näin vaipan ulkopinta ei ole kosketuksessa ihon kanssa.
- Taippivaippa on oikein päin, kun kiinnitysteipit ovat pukemista aloitettaessa selkäpuolella.
- Kiinnitä ensin alemmat siniset teipit hieman yläviistoon niin, että vaippa istuu hyvin haaroista ja sitten kiinnitä ylemmät siniset teipit alaviistoon, jotta saat napakan ja hyvän istuvuuden. Kiinnitystä avattaessa valkoinen teippi irrotetaan sinisestä alustasta.
- Jos tuote puetaan käyttäjän ollessa makuulla, käytä samoja pukemisoheja kuin seisovassa asennossa olevalle. Kun käännät potilasta, tue kädelläsi vaippaa selkäpuolelta.
- Käytä kosteusindikaattoria apuna asettellessasi vaippaa keskelle.

Ohivuoto

- Tarkista vaipan hyvä istuvuus.
- Tarkista, että olet valinnut oikean vaippakoon.
- Siirry imukykyisempään tuotteeseen vain, jos olet varma, että kyse ei ole pukemis-/kiinnitysongelmien aiheuttamista ohivuodoista.

Hävittäminen

- Rullaa vaippa ja käsittele toimipisteesi kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä laita vaippaa WC-pönttöön.



Attends Slip Regular -teippivaipat on proDERM-testattu dermatologisen tutkimusinstituutin toimesta.

Tuotteet kätevästi verkkokaupastamme
FYSNET.FI

www.fysnet.fi

info@fysnet.fi

045 137 4622